

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

برای نصب و راه اندازی این دستگاه به موارد زیر توجه گردد.

- ۱- این دستگاه در مدل‌های تک قمره و دو قمره نیازمند سقف استاندارد اتاق جراحی با ارتفاع ۴ متر میباشد هرچند که در بعضی از کلینیکها بنا به سفارشات خاص پایه های سقفی با ارتفاع کمتر نیز ساخته و نصب شده است ولی فقط استفاده در این شرایط همواره با مشکلاتی روبه بوده و رویه مرسوم نمیشود.
- ۲- این دستگاه نیازمند برق تکفاز ۲۲۰ ولت و ۵۰ هرتز بوده - که مجهز به فیوز تک پل تایپ C ۱۰ آمپر میباشد هرچند که خود دستگاه نیز مجهز به قطعات ایمنی میباشد.
- ۳- اتاق مورد استفاده باید دارای تهویه مطبوع بوده و حرارت اتاق زیر ۳۰ درجه باشد .
- ۴- در سقف اتاق باید پلیت فلزی جهت نصب چراغ به صورت استاندارد وجود داشته باشد در غیر این صورت تیم نصب باید فرایند عملیات محدود ساختمانی جهت اصلاح سقف را انجام دهد و این پلیت را یا به تیر سقفی یا گذرانده میلگرد از سقف تا طبقه بالا را انجام دهد .